


## Mise à jour du logiciel Biostim sur un Mac

Télécharger le fichier [http://www.mazetsante.fr/biostim/cle\\_biostim\\_1.18\\_mac.zip](http://www.mazetsante.fr/biostim/cle_biostim_1.18_mac.zip)

Afin d'éviter tout risque d'erreur, faire une copie du répertoire BiostimData (normalement sur le bureau), qui contient le logiciel à mettre à jour.

Dans le dossier  
« Téléchargement »,  
double cliquer sur  
« cle\_biostim\_1.18 »  
pour le décompresser

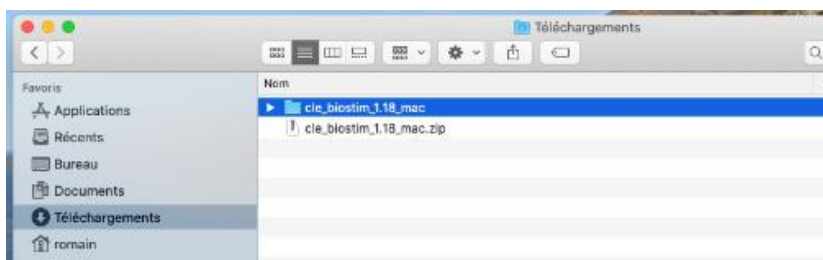

Ouvrir le répertoire cle\_biostim\_1.18, puis le répertoire « BiostimData »


Prendre les 2 éléments qu'il contient (« biostim.jar » et « appData »), et les déplacer vers le répertoire « BiostimData » qui contient le logiciel que l'on souhaite mettre à jour (il est normalement sur le bureau). Si une fenêtre apparaît, indiquer que les fichiers doivent remplacer les fichiers existants.

Ouvrir le répertoire BiostimData du bureau et lancer le logiciel.


Si la fenêtre suivante apparaît :



Ouvrir le programme « Préférences Système », puis « Sécurité et confidentialité »

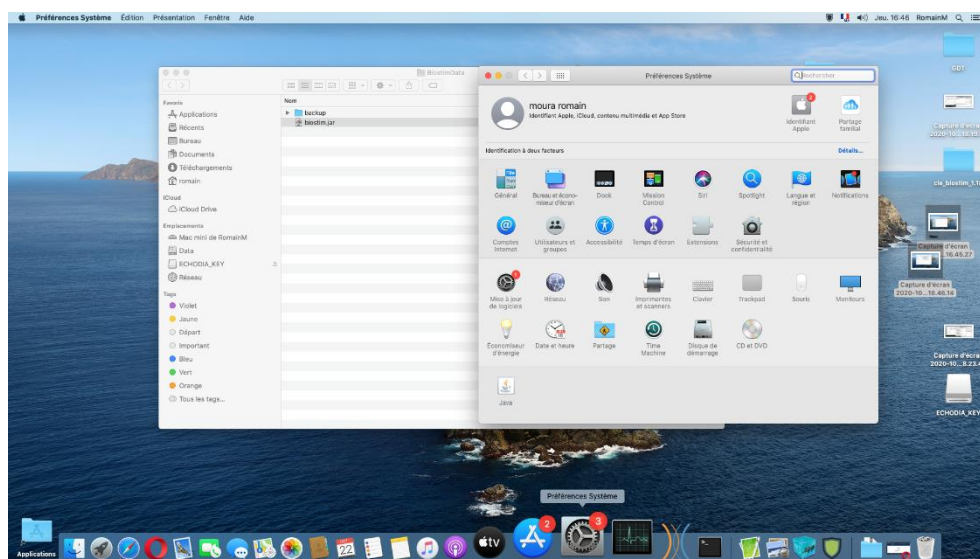

Cliquer sur « Ouvrir quand même » pour l'utilisation de « Biostim.jar »

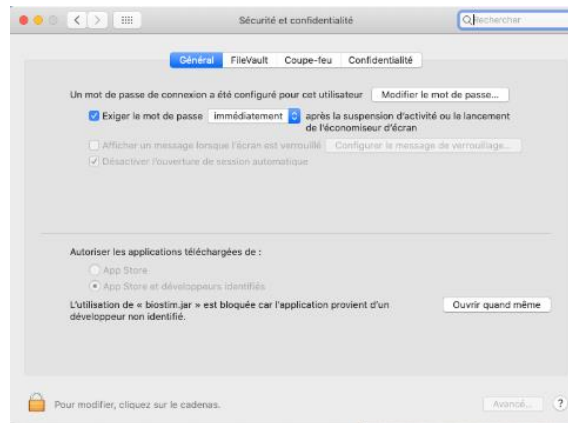

La fenêtre d'ouverture du Biostim apparaît à nouveau, indiquer « Ouvrir »



Le programme s'ouvre, vous pouvez désormais travailler

